



OPTIGARD®
Dispositivo per la gestione e cura degli
occhi del paziente critico o in fase
intraoperatoria

INDICAZIONI D'USO

- Paziente critico, sedato, non cosciente
- Paziente in fase intraoperatoria, in particolare nella chirurgia del cranio, collo e torace

MASCHERINA MONOUSO PER LA CURA E GESTIONE DEGLI OCCHI DEL PAZIENTE CRITICO O IN FASE INTRAOPERATORIA

- Mantiene il film lacrimale, e facilita la normale umidificazione corneale
- Previene l'essiccamento delle superfici oculari in mancanza di ammiccamento spontaneo delle palpebre ed, in particolare, durante la somministrazione di farmaci quali atropina, fenotiazina, antistaminici, etc
- Protegge gli occhi del paziente sotto anestesia dal contatto con sangue, fluidi e corpi estranei.
- Riduce il rischio di abrasioni corneali, lacerazioni ed emorragie della sclera
- Tramite le conchiglie ad elevata trasparenza, agevola il controllo delle pupille del paziente
- Il supporto in schiuma offre ottima conformabilità al viso del paziente e comfort allo stesso

TRE DIVERSE TIPOLOGIE SODDISFANO DIVERSE ESIGENZE

- Mascherina di protezione con singolo supporto di schiuma per pazienti critici o, in ogni caso, quando il paziente giace in posizione supina
- Mascherina di protezione con doppio supporto di schiuma per interventi chirurgici con paziente in posizione prona
- Mascherina di protezione con fettucce di sicurezza . Previene qualsiasi spostamento della mascherina durante interventi chirurgici particolarmente lunghi/complessi

WELCARE INDUSTRIES SpA

*via dei falegnami, 7 - 05010 Orvieto TR; tel. + 39 0763 316353 - fax +39 0763 315210
P: IVA 01232670552*



Welcare Industries S.p.A.

PRATICI, PRONTI ALL'USO, LATEX FREE

- Dispositivo monouso in busta singola in film trasparente PE
- Confezionato in pratici dispenser
- Dispositivo totalmente latex-free

MODALITA' D'USO

- Detergere con cura la sede d'applicazione
- Asciugare, tamponando, la superficie cutanea, avendo cura di rimuovere eventuali tracce di sostanze grasse
- Rimuovere i foglietti di carta siliconata posti a protezione dello strato adesivo
- Applicare OPTI_GARD® esercitando una leggera pressione sui bordi in modo da garantire un'adeguata aderenza alla superficie cutanea. Utilizzando OPTI_GARD® Safety Straps, posizionare le fettucce di sicurezza dietro la nuca e farle aderire tramite il velcro.
- E' consigliabile utilizzare un supporto per la testa quando il paziente è sul fianco o in posizione prona.
- Durante l'intervento, se necessario, è possibile rimuovere parzialmente e riposizionare OPTI_GARD®
- Rimuovere la mascherina lentamente e delicatamente

CLASSIFICAZIONE E CODICE CND:

- Dispositivo Medico Classe I
- T0306
- Numero di repertorio: 68915/R

Codice	Descrizione	Unità di vendita
91000	OPTI-GARD® Standard 15 unità per dispenser	1 cartone : 9 dispenser
91002	OPTI-GARD® Doppio 10 unità per dispenser	1 cartone : 9 dispenser
91003	OPTI-GARD® Safety Straps 8 unità per dispenser	1 cartone : 9 dispenser

Giugno 09

WELCARE INDUSTRIES SpA

*via dei falegnami, 7 - 05010 Orvieto TR; tel. + 39 0763 316353 - fax +39 0763 315210
P: IVA 01232670552*