



Welcare Industries S.p.A.

Sinaqua™ Shampoo Cap

Dispositivo Medico per la detersione del cuoio capelluto nel paziente immobilizzato

Caratteristiche:

- Sinaqua™ Cuffia Shampoo riduce i rischi insiti nella detersione dei capelli e del cuoio capelluto in pazienti immobilizzati. È costituito da una cuffia monouso, impermeabile esternamente e rivestita internamente di una soffice salvietta imbevuta di una soluzione detergente.
- Priva di latex
- Priva di alcol
- Senza risciacquo
- Elastico perimetrale che, migliorando l'aderenza della cuffia al capo, non permette alcuna fuoriuscita di liquido
- Monouso



Istruzioni d'uso:

- Sinaqua™ cuffia shampoo, chiuso nella sua busta, può essere riscaldata alla temperatura desiderata in forno a microonde per non più di 15 secondi o immergendo la busta in acqua calda.
- Posizionare la cuffia sul capo. Per detergere i capelli, massaggiare per pochi minuti. Togliere la cuffia e non risciacquare. Asciugare i capelli con il metodo normalmente utilizzato.
- Assicurarsi di non riscaldare Sinaqua eccessivamente.

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Confezione di vendita</i>
95200	Sinaqua™ Shampoo Cap Busta da 1 cuffia	1 scatola, 30 buste

Classificazione e codice CND:

Dispositivo Medico. Classe I

Codice CND: Z12040213

Numero di Repertorio: 56904/R