

SUGGERIMENTI PRATICI



CON CHE FREQUENZA
CAMBIARE LE MEDICAZIONI?

FERITE INFETTE **1-2 GIORNI**

FERITE DETERSE **3 GIORNI**



DOSAGGIO
HYIODINE

| DIMENSIONE DELLA FERITA | | QUANTITA' DI HYIODINE |
|-----------------------------------|--------|--------------------------|
| 5 x 5 cm (25cm ²) | ●● | 2 ml |
| 7,5 x 7,5 cm (56cm ²) | ●●●● | 5 ml |
| 10 x 10 cm (100cm ²) | ●●●●●● | 7 - 8 ml |

MISURE DISPONIBILI:

Flacone Hyiodine da 22g CODICE 15003
Flacone Hyiodine da 50g CODICE 15001

Hyiodine

L'AZIONE DI DUE FORZE PER LA GUARIGIONE
DELLE LESIONI ACUTE E CRONICHE



Contipro a.s.
Czech Republic

+420 465 519 530
sales@contipro.com
www.hyaluronanhealing.com

ACIDO IALURONICO E IODIO

ACCELERA IL DEBRIDEMENT E STIMOLA LA GUARIGIONE

HYIODINE

ANCHE PER LE FERITE PIÙ PROFONDE

Grazie alla formulazione in gel, Hyiodine è la medicazione perfetta per medicare e guarire ferite profonde e altre ferite difficili da raggiungere. Poiché ha un ampio effetto, Hyiodine può essere usato durante l'intero processo di guarigione.

SUPPORTA ATTIVAMENTE LA GRANULAZIONE
MODULA NATURALMENTE L'INFIAMMAZIONE
SICURO PER TUTTI I TESSUTI



UN BINOMIO PERFETTO PER UN RISULTATO GARANTITO

L'acido ialuronico ha un ruolo fondamentale nel processo di guarigione. È uno dei componenti più importanti della matrice extracellulare (ECM) ed ha una naturale capacità di organizzare l'intero processo di rigenerazione dei tessuti. In associazione con lo iodio crea le condizioni ideali per la guarigione delle lesioni più complesse, incluse le lesioni infette

| SOSTANZA ATTIVA | EFFETTI | SICUREZZA |
|---------------------------|---|---|
| ACIDO IALURONICO 1,5% | Attiva e regola il processo di guarigione. Favorisce la granulazione Aiuta l'angiogenesi | Naturale componente della matrice extracellulare (ECM) No reazioni allergiche Sicurezza metabolica |
| HYIODINE COMPLEX 0,25% | Un efficace antisettico contro i batteri G+/G- Non rallenta il processo di guarigione Non crea resistenza | Forma naturale dello iodio I2 a bassa concentrazione Non sono riportate reazioni allergiche Espulso naturalmente con le urine |



OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI

Hyiodine è normalmente usato per curare le ferite croniche dove il processo di guarigione deve essere riattivato ed accelerato. Garantisce anche un eccellente risultato estetico.
Il tessuto appena creato è solido e flessibile con cicatrici significativamente ridotte.

ULCERE DEL PIEDE DIABETICO ED ALTRE LESIONI CRONICHE
DEISCENZE CHIRURGICHE
LESIONI POST TRAUMATICHE

APPLICABILE AD OGNI FORMA DI FERITA

Hyiodine è un gel viscoso che ha un'ampia versatilità di applicazione. È la scelta ideale per il trattamento delle ferite profonde con un fondo irregolare. Inoltre può essere usato nelle lesioni con esposizione di ossa, capsule articolari e organi.


CAVITÀ PROFONDE

Usare una garza saturata di Hyiodine per riempire cavità profonde




FISTOLE STRETTE

Usare Hyiodine direttamente nella fistola usando una siringa

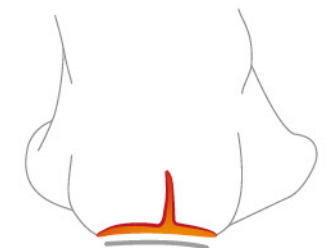

FERITE CON BORDO ARROTONDATO

Applicare una garza saturata di Hyiodine per riempire perfettamente l'area sottostante della ferita

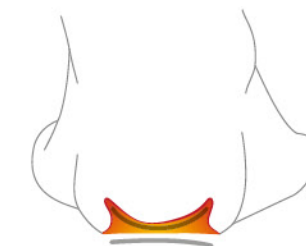

FERITE CANALIZZATE

Applicare una garza saturata di Hyiodine in modo da fare sporgere entrambe le estremità della garza

